LABORATORIO DE REFERENCIA PARA TIPADO MOLECULAR DE PATOGENOS NOSOCOMIALES Y DETECCIÓN DE MECANISMOS DE RESISTENCIA A ANTIMICROBIANOS DE INTERÉS SANITARIO EN ANDALUCÍA.

INSTRUCCIONES PARA SOLICITUD DE SERVICIOS Y ENVÍO DE MUESTRAS

El Laboratorio de referencia para tipado molecular de patógenos nosocomiales y detección de mecanismos de resistencia a antimicrobianos de interés sanitario está ubicado en el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Virgen Macarena en el contexto de la Unidad Intercentros de Enfermedades Infecciosas , Microbiología Clínica y Medicina Preventiva de Sevilla. Su misión es suministrar información relevante sobre bacterias multirresistentes productoras de brotes nosocomiales que permitan la toma de decisiones que favorezcan la vigilancia y control de los mismos. La cartera básica de servicios se detalla en el *anexo 1*.

Cada centro hospitalario de Andalucía que requiera los servicios del laboratorio contactará previamente por teléfono o correo electrónico con los facultativos Lorena López Cerero o Felipe Fernández Cuenca (telefono completo: 600162426, corporativo: 652426; correos: llopez@us.es y felipefc@us.es) para realizar una evaluación previa de la situación, asignar código al episodio y establecer el número y tipo de aislados a enviar. No se admitirán envíos que no hayan sido autorizados previamente.

1. Envío de muestras. El envío de muestras se realizará conforme a las normas detalladas en el *anexo 2*. Cada aislado deberá acompañarse de un Formulario de Aislado (*anexo 3*) debidamente relleno. El horario de recepción de envíos autorizados será de lunes a viernes de 8 a 20 horas. La dirección de los envíos será:

Dra Lorena López Cerero. Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Av/ Dr Fedriani SN. Sevilla 41009.

- **2. Emisión de informes**. La emisión de los informes dependerá del número de microorganismos y de las características de cada brote o endemia. Como norma habitual se emitirán 2 informes uno preliminar y otro definitivo. Los tiempos medios de emisión serán:
 - ✓ Informe preliminar: a los 10 días de la recepción de la muestra.
 - ✓ Informe definitivo: a los 21 días de la recepción de la muestra.

El laboratorio de referencia comunicará los resultados al centro solicitante y a Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública (Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, SVEA).

PIRASOA

ANEXO 1. CARTERA DE SERVICIOS.

Las determinaciones que a continuación se relacionan se realizarán sobre aislados clínicos de pacientes, aislados de portadores o muestras ambientales según acuerdo previo con el centro solicitante.

Resistencia a antimicrobianos. Estudio fenotípico y genotípico.

- 1. Detección e identificación de genes de beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE) tipo TEM, SHV y CTX-M, en enterobacterias.
- 2. Detección e identificación de genes de AmpC plasmídicas (FOX, DHA, CMY, etc..). Detección de hiperproducción de genes AmpC cromosómicos.
- 3. Detección de mutaciones en los genes que regulan la expresión de los enzimas AmpC cromosómicos.
- 4. Detección de hiperproducción de genes OXY en *K. oxytoca* con resistencia a cefalosporinas de tercera generación.
- 5. Detección e identificación de genes de beta-lactamasas que hidrolizan carbapenems (carbapenemasas):
 - a) Oxacilinasas de Acinetobacter baumannii.
 - b) Carbapenemasas tipo IMP, VIM, OXA-48, NDM y KPC (*A. baumannii, Pseudomonas aeruginosa* y enterobacterias).
- 6. Sobreexpresión de bombas de expulsión activa: MexABOprM (*P. aeruginosa*), adeABC (*A. baumannii*) y acrAB (*K. pneumoniae*).
- 7. Detección de resistencia a oxacilina (SARM) en Staphylococcus aureus.
- 8. Detección de genes vanA y vanB en aislados de Enterococcus spp
- 9. Detección de cfr en aislados de Staphylococcus spp resistentes a linezolid
- 10. Identificación de elementos genéticos móviles implicados en la resistencia a antimicrobianos (plásmidos, integrones, transposones y secuencias de inserción).

Tipado molecular o Genotipado.

- 1. *E. coli* y *Klebsiella spp* con fenotipo productor de BLEE, hiperproducción de AmpC, AmpC plasmídica ó carbapenemasa.
- 2. Serratia marcescens y Enterobacter spp multirresistente
- 3. K. oxytoca hiperproductor de OXY
- 4. A. baumannii
- 5. P. aeruginosa.
- 6. S. aureus resistente a meticilina o a linezolid.
- 7. Enterococcus spp resistente a glicopéptidos

La cartera de servicios se irá ampliando paulatinamente. Todos los centros serán informados oportunamente de estos cambios.

PIRASOA

ANEXO 2. NORMAS PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS

- 1. Los aislados se enviarán con torunda y se transportarán a T^a ambiente al laboratorio de referencia en medio Stuart o Amies.
- 2. Cada aislado deberá estar identificado correctamente y acompañado de su correspondiente Formulario de aislado (*anexo 3*).
- 3. Las muestras deben ser embaladas y transportadas como sustancias infecciosas de categoría A, de acuerdo a la normativa vigente por la OMS (Guía sobre la reglamentación del transporte de sustancias infecciosas 2011-2012) y BOE nº 63 (14/3/2013).
- 4. Contactar con el servicio de mensajería habilitado en su centro para que recoja las muestras adecuadamente embaladas.
- 5. Contactar telefónicamente (600162426 o corporativo 652426) con el laboratorio de referencia para informar del momento en el que saldrán las muestras.
- 6. La dirección de envío de las muestras es:

Lorena López/Felipe Fernández

Servicio de Microbiología (primera planta)

Hospital Virgen Macarena

Avda. Dr. Fedriani s/n

41009 Sevilla

PIRASOA

ANEXO 3. FORMULARIO DE AISLADO. (Rellenar uno por aislado).

•	NUHSA:		
•	N° de referencia (a facilitar por el laboratorio de referencia):		
•	N° de aislado (numeración correlativa):		
•	Centro remitente:		
•	Fecha de aislamiento:		
•	Siglas del paciente en aislados clínicos (3 siglas):		
•	Servicio o Unidad:		
	○ UCI ○ Neonatología ○ Unidades Médicas ○ Unidades quirúrgicas		
	Otros (Especificar):		
•	Tipo de muestra:		
	O <u>Clínica:</u>	○ Sangre ○ Orina ○ Respiratoria	
		Otras (Especificar):	
	○ <u>Vigilancia</u> :	○ Frotis nasal ○ Frotis rectal ○ Aspirado traqueal	
		○ Frotis faríngeo ○ Frotis axilar	
		Otros (Especificar):	
	<u>Ambiental</u>	Ambiental: (Especificar)	
•	Identificación del microorganismo en origen:		
•	Método de identificación y antibiograma:		
•	Tares as consumual annumer outside of recommendate que augument copia act		
	informe emitido en el centro de origen.		